

ZESTAW DO POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU PO PORONIENIU

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

1. Plastikowy jałowy pojemnik – 1 szt.
2. Sól fizjologiczna - 30 ml
3. Dokumenty do wypełnienia

Zlecenie wykonania badania wraz z deklaracją świadomej zgody
– 1szt (w razie konieczności dokumenty można pobrać ze strony internetowej GYNCENTRUM)

Jest to badanie płatne, nierefundowane przez NFZ.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁEM:

POBRANIA MATERIAŁU


- **Przed pobraniem** należy wypełnić zlecenie badania (czytelnie, łącznie z podpisem lekarza).
- Pacjent musi **podpisać zgodę** na wykonanie badania (na odwrocie skierowania).

Uwaga! Wszystkie poniższe czynności należy wykonywać w jałowych rękawiczkach!


1. Pojemnik z kosmówką opisujemy dwoma danymi identyfikującymi pacjentkę (imię i nazwisko, PESEL lub data urodzenia). Pojemnik jest jałowy - nie należy go odkręcać bez potrzeby!
2. Lekarz pobiera kilka kosmków z kosmówki krzaczastej (15-20 mg) i umieszcza w jałowym pojemniku z solą fizjologiczną (30 ml).
3. Pojemnik z pobranym materiałem należy szczelnie zakręcić i owinąć ligniną lub gazikami i umieścić w woreczku strunowym.
4. Wypełnione dokumenty należy umieścić w drugim woreczku strunowym.
5. Oba woreczki należy włożyć do pudełka.

TRANSPORT MATERIAŁU DO LABORATORIUM:

- Materiał należy dostarczyć jak najszybciej po pobraniu.
- Transportować w temp 4-8 °C .
- Do czasu transportu zestaw z pobranym materiałem należy przechowywać w lodówce w temp. 4-8 °C. Nie zamrażać!
- Czas od pobrania do dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 48 h.

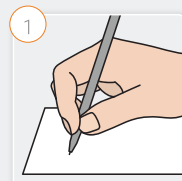


Wypełnić czytelnie skierowanie oraz uzupełnić deklarację świadomej zgody pacjenta. Skierowanie umieścić w jednym z woreczków strunowych.

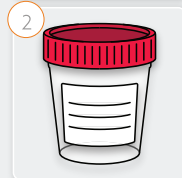

Pojemnik okleić kodem lub opisać danymi: imię, nazwisko, nr PESEL.




Zachować zasady aseptyki – zdezynfekować ręce oraz nałożyć jałowe rękawiczki.

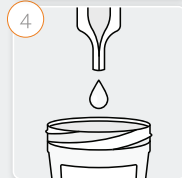

Jałowy pojemnik odkręcić i uzupełnić dołączoną w zestawie solą fizjologiczną (30 ml).



Pobrać fragment kosmówki (15-20mg) i umieścić w pojemniku wcześniej wypełnionym solą fizjologiczną.

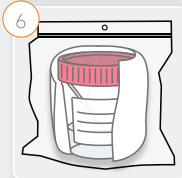

Pojemnik z materiałem szczelnie zakręcić, owinąć ligniną oraz umieścić w drugim woreczku strunowym.



Oba woreczki (z materiałem oraz ze skierowaniem) umieścić w pudełku.



Materiał dostarczyć do laboratorium GYNCENTRUM.

MIEJSCE DOSTARCZENIA MATERIAŁU DO BADANIA:

Gyncentrum Sp. z o.o.
Pracownia Genetyczna
tel. +48 735 122 777

ul. Żelazna 1
40-851 **Katowice**

pn-pt: 07:00-19:00
sb: 07:00-13:00

ul. Mehoffera 10
31-322 **Kraków**

pn-pt: 07:00-19:00

ul. Kozielskiego 9
42-218 **Częstochowa**

pn-wt: 08:00-14:00
śr-cz: 07:00-14:00
pt: 08:00-12:00

OSOBIŚCIE

ul. Komorowicka 140
43-300 **Bielsko-Biała**

pn: 07:00-17:00
wt: 07:00-14:30
śr: 07:00-17:00
czw-pt: 07:00-14:30

ul. Tomasz Zana 32A
20-601 **Lublin**

wt: 08:00-16:00
śr: 08:00-10:00

ul. Głogowska 151
60-266 **Poznań**

pt: 08:00-14:00

ul. Wojska Polskiego 8a
41-208 **Sosnowiec**

pn-pt: 06:00-22:00
sb: 06:00-14:00
nd: 06:00-14:00

Wrocław

Wkrótce otwarcie!

Warszawa

Wkrótce otwarcie!

KURIEREM

Aby zamówić kuriera, należy skontaktować się z Doradcą Pacjenta pod nr telefonu: +48 735 122 777.

Pobraný materiał biologiczny należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny (zakwalifikowany do grupy materiałów o kodzie UN3373, podlegający instrukcji pakowania P650).

Zasady transportu powinny być zgodne z :

1. „Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”, zwaną umową ADR, opublikowaną 26 lipca 2005 r. (Dz.U.nr 178, poz.1481)
2. Ustawą z dnia 28 października 2002r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U nr 199, poz 1671 z późn. zm).
3. "Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances", WHO, 2009-2010, Aneks 4, instrukcja pakowania P650.